

CONNETTIVINA *BIO* Garze

Descrizione del prodotto

CONNETTIVINABIO Garze è un prodotto sterile, le garze impregnate di crema sono costituite da acido ialuronico come componente principale. L'acido ialuronico è un polisaccaride biologico (glicosaminoglicano) distribuito nella matrice extracellulare di molti tessuti. Grazie alle sue proprietà idrofile fornisce uno spazio idratato intorno e tra le cellule, facilitando così la migrazione delle cellule. Le garze CONNETTIVINABIO sono sterilizzate a raggi-gamma. CONNETTIVINABIO è disponibile in differenti forme (CONNETTIVINABIO Crema, Garze e Gel). CONNETTIVINABIO Garze è preferibile per ferite estese.

Composizione

Componente Principale: Acido Ialuronico sale sodico allo 0.05%

Altri componenti: Cotone, Polietilenglicole 4000, Glicerolo, Acqua purificata.

Indicazioni

CONNETTIVINABIO Garze è indicata per il trattamento di irritazioni cutanee e lesioni. In particolare, è destinata a coprire le ferite acute e croniche (abrasioni, sedi di prelievo di tessuto, incisioni post-operatorie, ustioni di primo e secondo grado, ulcere vascolari e metaboliche e piaghe da decubito) e per fornire un ambiente umido, proteggendolo così da abrasioni, attriti ed essiccazioni.

Dosaggio e somministrazione

Le ferite o ulcere devono essere pulite e disinfettate prima del trattamento. Applicare una o più garze a seconda delle dimensioni della lesione, due o tre volte al giorno, utilizzando delle pinzette sterili per prendere la garza. Non usare per più di 30 giorni consecutivi. L'area trattata dovrebbe essere coperta da un bendaggio sterile.

Controindicazioni

Non somministrare sui pazienti con accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

Non usare se la confezione è danneggiata.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato nella sua confezione originale a temperatura inferiore a 30 °C.

In caso di gravidanza, allattamento e utilizzo nei bambini, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto poiché la sicurezza e l'efficacia di CONNETTIVINABIO in questi casi non sono state stabilite.

La garza è sterile. La sterilità della garza è garantita fino a quando la confezione è chiusa e non danneggiata.

La garza è per singolo utilizzo; questo significa che deve essere usata una sola volta e per un singolo paziente.

Se il prodotto è riutilizzato Fidia Farmaceutici non può garantirne prestazione, funzionalità, struttura del materiale, pulizia e sterilità del prodotto.

Il riutilizzo potrebbe portare a malattie, infezioni e/o gravi lesioni al paziente o utilizzatore.

Dopo l'uso smaltire secondo la prassi nazionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Reazioni avverse

Le seguenti reazioni avverse locali possono verificarsi occasionalmente: rash sul sito di applicazione, prurito, sensazione di bruciore, irritazione della pelle, secchezza, eritema, dermatiti, depigmentazione cutanea. I sintomi sono solitamente transitori, di lieve entità e raramente richiedono una interruzione anticipata del trattamento.



Interazioni

Non usare in concomitanza con disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, perché l'acido ialuronico può precipitare in loro presenza. Il trattamento concomitante delle ferite con antibiotici topici o altri agenti locali non ha mai dato luogo a interazioni o incompatibilità con CONNETTIVINABIO Garze.

Conservazione

Conservare al di sotto di 30°C.

Confezione

Astuccio contenente dieci garze impregnate di crema, 10 x 10 cm.

Fabbricante: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (Padova), Italia

Data di ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Luglio 2019

CE 0123



Consultare le istruzioni per l'uso

STERILE R

Sterilizzato con radiazioni ionizzanti



Non riutilizzare



Utilizzare entro

LOT

Codice del lotto



Limite superiore di temperatura



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Fabbricante

33000008/D