

# CONNETTIVINA BIO *Crema*



## Descrizione del prodotto

CONNETTIVINABIO Crema è una preparazione topica costituita da acido ialuronico come componente principale. L'acido ialuronico è un polisaccaride biologico (glicosaminoglicano) distribuito nella matrice extracellulare di molti tessuti.

Grazie alle sue proprietà idrofiliche fornisce uno spazio idratato intorno e tra le cellule, facilitando così la migrazione delle cellule. CONNETTIVINABIO è disponibile in differenti forme (CONNETTIVINABIO Crema, Garze e Gel).

## Composizione

Componente Principale: Acido ialuronico sale sodico allo 0.2%

Altri componenti: Polietilenglicole 400 monostearato, Decil estere dell'acido oleico, cera emulsionante, Glicerolo, soluzione di Sorbitolo al 70%, Sodio deidroacetato, Metil p-idrossibenzoato, Propil p-idrossibenzoato, Fragranza, Acido Lattico, Acqua purificata.

## Indicazioni

CONNETTIVINABIO Crema è indicata per il trattamento di irritazioni e lesioni cutanee. In particolare, è destinata a coprire le ferite acute (sedi di prelievo di tessuto, incisioni post-operatorie, ustioni di primo e secondo grado) e ferite croniche (ulcere vascolari e metaboliche e piaghe da decubito).

## Dosaggio e somministrazione

Le ferite o ulcere devono essere pulite e disinfettate prima del trattamento. Applicare uno strato sottile di crema sulla superficie della ferita, due o tre volte al giorno per non più di 30 giorni consecutivi. L'area trattata dovrebbe essere coperta con una garza sterile e un bendaggio sterile.

## Controindicazioni

Non somministrare ai pazienti con una accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto.

## Avvertenze e precauzioni

Solo per uso esterno.

Non usare se la confezione è danneggiata.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato nella sua confezione originale a temperatura inferiore a 30 °C.

Eliminare dopo 12 mesi dalla prima apertura.

Evitare il contatto diretto del contenitore con la ferita.

Ogni tubo di CONNETTIVINABIO Crema dovrebbe essere utilizzato da un solo paziente al fine di ridurre il rischio di infezioni crociate.

In caso di gravidanza, allattamento e utilizzo nei bambini, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto poiché la sicurezza e l'efficacia di CONNETTIVINABIO in questi casi non sono state stabilite.

Dopo l'uso, smaltire secondo la prassi nazionale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Reazioni avverse

Le seguenti reazioni avverse locali possono verificarsi occasionalmente: rash sul sito di applicazione, prurito, sensazione di bruciore, irritazione della pelle, secchezza, eritema, dermatiti, depigmentazione cutanea.

Un effetto transitorio di gusto metallico (disgeusia) si può verificare con un'incidenza molto bassa e potrebbe essere correlato a condizioni mediche preesistenti del paziente.

I sintomi sono solitamente transitori, di lieve entità e raramente richiedono una interruzione anticipata del trattamento.

## Interazioni

Non usare in concomitanza con disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, perché l'acido ialuronico può precipitare in loro presenza. Il trattamento topico concomitante di ferite con antibiotici o altri agenti locali non ha mai dato luogo a interazioni o incompatibilità con CONNETTIVINABIO Crema.

## Conservazione

Conservare al di sotto di 30°C.

## Confezioni

Astuccio contenente un tubo da 15 g.

Astuccio contenente un tubo da 25 g.

Astuccio contenente un tubo da 30 g.

Astuccio contenente un tubo da 100 g.

## Fabbricante:

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (PD), Italia

CE 0123

Data di ultima revisione delle istruzioni per l'uso: Novembre 2020



Consultare le istruzioni per l'uso



Utilizzare entro

LOT

Codice del lotto



Limite superiore di temperatura



Periodo post apertura



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Fabbricante